

機械器具 68 印象採得または咬合採得用器具
一般医療機器 歯科材料加温器 70720000

ユーデント アガーコンディショナー

【形状・構造及び原理等】

形状：W120×D150×H95（mm）・約1.5kg
構造等：AC100Vを電源としたヒーターにて、アルミブロックを一定時間、所定の温度で加熱し、アルミブロック部にセットされたゲル状の歯科用寒天印象材をゾル状に変化させた後、使用可能な温度にて保存をする歯科材料加温器。

【使用目的・効能または効果】

使用目的・用途：歯科用寒天印象材を適切な使用状態に維持するために用いる加温装置。

【品目仕様】

- ①定格電源：AC100V、50/60HZ
- ②電源入力：150VA
- ③消費電力：150W
- ④溶解温度：98±1℃
- ⑤溶解保持時間：1～30分
- ⑥保存温度：55～70℃
- ⑦予約タイマー：1～60時間
- ⑧メモリー機能：予約タイマー・溶解保持時間・保存温度
- ⑨寒天処理能力：カートリッジ16本（8本×2）
- ⑩寒天ガイドカバー：カートリッジタイプ用
- ⑪異常保護：過熱検知105℃ ヒューズ 2A
- ⑫寸法・質量：W120×D150×H95（mm）・約1.5kg

【操作方法または使用方法等】

- 1) アルミブロックの所定位置に歯科用寒天印象材カートリッジ一日使用分をセットし、ON/OFFボタンを押す（赤ランプ点灯）。
- 2) 温度設定が必要な場合はこの時点で行う。
- 3) 約30分で使用可能（緑ランプ点灯）。
- 4) 印象採得時に術者の手に少量採って、適温であることを確かめてから使用する。

【使用方法上の注意】

- 1) 赤色ランプ点灯中は、ガイドカバー（黒い部分）及び寒天カートリッジには触れないこと。
- 2) ON/OFFボタンをOFFにした時には、直ぐに電源コードを抜かないこと。火傷防止のため50℃以下に冷えるまでファンが回転しています。
- 3) 使用後はON/OFFボタンをOFFにすること。また長期間使用しないときは電源プラグをコンセントから抜くこと。絶縁劣化による感電・火災のおそれがあります。
- 4) ガイドカバー内に流出した寒天を清掃するため、またガイドカバーを交換するためにガイドカバーを取り外す場合は、必ず電源プラグを抜き、本器の内部が冷えてから作業すること。
- 5) 底面の調整用ネジ類には一切手を触れないこと。異常動作してけがをするおそれがあります。
- 6) 温度異常の場合（数値表示部がHiで点滅し、電子音がピピピッと連続して鳴り続けているとき）には、速やかに電源プラグを抜くこと。異常動作をしてけがをするおそれがありますので、お買い上げの販売店を通してメーカーへ点検修理を依頼してください。

【使用上の注意】

- 1) 濡れた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししないこと。感電するおそれがあります。
- 2) 水をかけない事。感電・火災のおそれがあります。
- 3) 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理な力をくわえないこと。
- 4) 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らず、電源プラグを持って引き抜くこと。コードの損傷を招き感電・火災のおそれがあります。
- 5) 保守・点検の項目以外の分解・修理や改造は絶対に行わないこと。
- 6) 本器は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- 7) 引火性のものを近くに置かないこと。爆発したり火災のおそれがあります。
- 8) 水のかかるような場所に置かないこと。感電・漏電及び発火のおそれがあります。
- 9) 交流100V、2A以上の電源コンセントを使用すること。火災・感電の恐れがあります。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

本器は、歯科医療の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【包装】

ダンボール外箱にて単品包装。
（本体×1台、使用説明書×1冊、添付文書×1枚）

【製造販売業者及び製造業者の氏名または名称及び住所等】

製造販売元 株式会社ユーデント
及び製造元

住所 千葉県千葉市美浜区浜田2丁目25番地
製造販売業許可番号 12B2X10001
TEL 043-213-8151（代）
FAX 043-213-8152

使用説明書を必ずご参照下さい