

機械器具 65 歯科用充填器  
一般医療機器 歯科用注入器具 70718000

## ユーデント アガーシリンジ (カートリッジ専用)


### 【形状・構造及び原理等】

本品は、次の原材料で構成される。

本 体：真鍮＋クロームメッキ

止めネジ：ステンレス SUS304

針 部：針基 真鍮＋クロームメッキ、ニードル SUS304

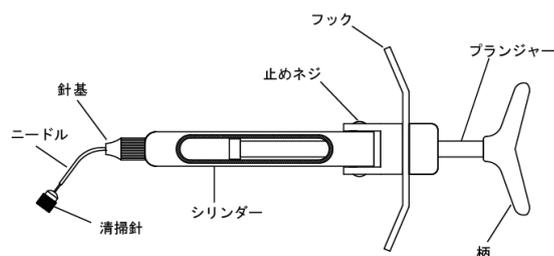

### 【使用目的、効能または効果】

本器具は、寒天印象材の注入器で印象採得に使用する。

### 【操作方法または使用方法等】

- 1) 清掃針を針から引き抜く。
  - 2) プランジャーを引きシリンダーを倒す。
  - 3) シリンダーに、加温し溶解した寒天カートリッジを挿入する。
  - 4) シリンダーを元の位置に戻す。
  - 5) 手に寒天印象材を押し出し、寒天印象材の溶解具合などを確認してからプランジャーを押し寒天を注入する。
  - 6) 使用後は、洗浄、清掃した後、充分に乾燥して保管する。  
針部は、乾燥後、清掃針を挿入した状態で保管する。
- 滅菌方法：オートクレーブ（134℃ 3分、または 121℃ 30分）による滅菌を行なう。

### 【使用上の注意】

〔使用注意〕

- ①本器具の針部を外す時は、必ず針基を持って回すこと。  
ニードル部分に無理な力がかかると破損につながります。
- ②器具の落下など、取り扱いの不注意は破損の原因になるので特に取り扱いに注意すること。
- ③本器具は、【使用目的、効能または効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ④本器具は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

〔貯蔵・保管方法〕

- ①本器具は、サビが発生する可能性があるため、化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
- ②本器具は、歯科医療の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

### 【保守・点検に係わる事項】

1) 保守・点検

- ①ニードル部分の寒天の詰まりを清掃すること。
- ②使用前にヘッド部のネジ磨耗、針部の損傷、亀裂、針先の磨耗などの有無を確認し、発見された場合は使用をとりやめること。
- ③使用後は各部を分離し洗浄、清掃、消毒した後、十分に乾燥して、保管すること。針部は、乾燥後、清掃針を挿入した状態で保管すること。

2) 洗浄・消毒等

- ①使用後は、速やかに精製水を用いて器具に付着した血液、体液、組織片を速やかに除去し、職業感染防止のために洗浄・消毒すること。その際、確実に血液や体液、組織片等が除去できたか、ジョイント部や複雑な個所の目視をし、残留異物の付着がないことを確認すること。
- ②薬液消毒を行うときは、薬剤の添付文書または取り扱い説明書に従って使用上の注意を遵守すること。薬剤の種類によっては金属素材に影響を及ぼすことがある。
- ③洗浄、消毒、滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食することがある。
- ④洗浄液・消毒剤・滅菌器については、各製造業者の指示に従い正しく使用すること。また、洗浄、消毒、滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。

### 【包装】

〔セット包装〕

- 1) 本体：1
- 2) 針部：20G(清掃針付)、18G 各 1

### 【製造業者及び製造業者の氏名または名称及び住所等】

製造販売元 株式会社ユーデント  
及び製造元

住 所 千葉県千葉市美浜区浜田 2 丁目 25 番地  
製造販売業許可番号 12B2X10001  
TEL 043-213-8151（代）  
FAX 043-213-8152